





INSTRUKCJA

ZESTAWY DO MOCZU

0		Napełnij kubeczek do moczu VACUTEST® próbką moczu i zakręć zakrętką z wbudowanym transferem.
1	Usuń ochronną naklejkę z wieczka i włóż probówkę VACUTEST® z żółtym korkiem do transferu. Przytrzymaj dotąd, aż mocz przestanie wpływać do próbki.	
2		Kiedy próbka VACUTEST® się napełni, wysuń ją z transferu. Naklej z powrotem naklejkę ochronną na wieczko – zapobiegnie to niepożądanemu zakłuciu.
3	Ruchem przelewowym wymieszaj materiał w próbce VACUTEST® kilkakrotnie. Zużyty kubek oddaj do utylizacji.	



Dane do faktury:

PZ Cormay S.A.
ul. Wiosenna 22 | 05-092 Łomianki
NIP: 1181872269 | REGON: 140777556

Dane teleadresowe:

PZ Cormay S.A.
ul. Puławska 303 | 02-785 Warszawa
office@cormay.com | tel.: (22) 751 79 10 | fax: (22) 751 79 11

www.cormay.com