

# PRÓŻNIOWY SYSTEM POBIERANIA KRWI

KOLEJNOŚĆ POBRANIA	KOLOR KORKA	RODZAJ DODATKU	LICZBA ODWRÓCEŃ	PARAMETRY WIROWANIA
POSIEW KRWI		NIE ZAWIERA	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
KOAGULOLOGIA		ANTYKOAGULANT: CYTRYNIAN SODU 3,8% LUB 3,2%	4-5 RAZY	2000-2500g 15-20 min. ↓ 20-25°C
OB		ANTYKOAGULANT: CYTRYNIAN SODU 3,8%	8-10 RAZY	NIE DOTYCZY
BIOCHEMIA		AKTYWATOR WYKRZEPANIA: KRZEMIONKA	6-8 RAZY	1300g 10 min. ↓ 20-25°C
		AKTYWATOR WYKRZEPANIA: KRZEMIONKA + ŻEL	6-8 RAZY	1600-2000g / 3000g 10 min. / 5 min. ↓ 20-25°C
		AKTYWATOR WYKRZEPANIA: TROMBINA	6-8 RAZY	1600-2000g / 4000g 10 min. / 3 min. ↓ 20-25°C
OSOCZE		ANTYKOAGULANT: HEPARYNA LITOWA LUB SODOWA	6-8 RAZY	1300g 10 min. ↓ 20-25°C
HEMATOLOGIA		ANTYKOAGULANT: K2 LUB K3 EDTA	6-8 RAZY	NIE DOTYCZY
		ANTYKOAGULANT: K2 EDTA	6-8 RAZY	NIE DOTYCZY
GLUKOZA		ANTYKOAGULANT: NaF + K3 EDTA LUB NaF + SZCZAWIAN POTASU	6-8 RAZY	1300g 10 min. ↓ 20-25°C


**Dane do faktury:**

 PZ Cormay S.A.  
 ul. Wiosenna 22 | 05-092 Łomianki  
 NIP: 1181872269 | REGON: 140777556

**Dane teleadresowe:**

 PZ Cormay S.A.  
 ul. Puławska 303 | 02-785 Warszawa  
 office@cormay.com | tel.: (22) 751 79 10 | fax: (22) 751 79 11

[www.cormay.com](http://www.cormay.com)