

**NOTATKA DORADCZA
ADVISORY NOTE**

Data wydania Date of issue	2020-05-19
Numer notatki Note number	ND_2005_02
Nazwa i numer katalogowy wyrobu Product name and catalogue number	A-800 LDH Nr kat. 7-836
Numer serii Lot number	wszystkie serie
Data ważności Expiry date	n/d
Opis sytuacji Issue description	<p>W przypadku oznaczeń, w których kierunek reakcji jest malejący, a wartość substrate depletion jest równa maksymalnej absorbancji mierzonej przez analizator, mogą wystąpić problemy z kalibracją testu. W celu zapobieżenia takiej sytuacji należy usunąć wartość substrate depletion zgodnie z załączoną do notatki aplikacją.</p>
Konieczne działania Necessary actions	<p>Zapoznanie się z treścią notatki oraz odesłanie wypełnionego formularza weryfikacyjnego. Aktualizacja aplikacji na analizatorze przed wykonaniem oznaczenia.</p>

Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim Użytkownikom powyższego produktu oraz zachowanie Notatki doradczej jako dokumentacji systemu jakości.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza weryfikacyjnego, w celu potwierdzenia otrzymania powyższych informacji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane powyższą sytuacją.

Please provide this information to all Users of the above product and keep the Advisory Note as a quality system documentation.

Please complete and return the attached Verification Form to confirm receipt of the Advisory Note.

We apologize for any inconvenience caused by the above situation.

Z poważaniem,
Sincerely,

X *Anna Smolira*

Anna Smolira
Dział Zapewnienia Jakości/Quality Assurance
Podpisany przez: Anna Smolira