

## NOTATKA DORADCZA

Data wydania	06.04.2022
Numer notatki	ND_2204_05
Nazwa i numer katalogowy wyrobu	<b>Nazwa</b> ACCENT-300 FERRUM <b>Numer katalogowy</b> 7-358
Numer serii	<b>wszystkie serie</b>
Data ważności	n/d
Opis sytuacji	
Podczas rutynowej kontroli jakości odczynnika uzyskano wyniki wykraczające poza wewnętrzne kryteria akceptacji. Ponownie wyznaczono wartości żelaza w: - <b>CORMAY SERUM HN</b> (Nr kat. 5-172) serii HN09, - <b>CORMAY SERUM HP</b> (Nr kat. 5-173) serii HP09. Nowe wartości zamieszczono w erracie NDE_2204_03 (Załącznik 1).	
Konieczne działania	
Należy zapoznać się z treścią erraty NDE_2204_03 i od momentu otrzymania notatki doradczej <b>stosować nowo wyznaczone wartości</b> kontroli podczas oznaczeń żelaza. Należy przeprowadzić <b>kontrolę jakości</b> oraz w razie potrzeby <b>kalibrację</b> przed zlecaniem próbek pacjentów. Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza weryfikacyjnego.  Notatka ma charakter informacyjny. <b>Nie należy niszczyć produktu!</b>	

Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim Użytkownikom powyższego produktu oraz zachowanie Notatki doradczej jako dokumentacji systemu jakości.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza weryfikacyjnego, w celu potwierdzenia otrzymania powyższych informacji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane powyższą sytuacją.

Z poważaniem,

X *Anna Smolira*

Anna Smolira

Dział Zapewnienia Jakości

Podpisany przez: Anna Smolira