

NOTATKA DORADCZA

Data wydania	13.06.2022	
Numer notatki	ND_2206_02	
Nazwa i numer katalogowy wyrobu	Nazwa	Nr kat.
	Liquick Cor-UA 30	2-235
	Liquick Cor-UA 60	2-208
	Liquick Cor-UA 120	2-209
	ACCENT-200 UA	7-208
	ACCENT-300 UA	7-308
	A-400 UA	7-408
	A-800 UA	7-813
	PRESTIGE 24i LQ UA	4-208
	PRESTIGE 24i LQ UA	4-408
	HC-UA	4-508
	OS-UA	9-409
	B50-UA	5-515
Numer serii	wszystkie serie	
Data ważności	n/d	
Opis sytuacji		
<p>W celu zapewnienia spójności pomiarowej, wartości kwasu moczowego w kalibratorach i materiałach kontrolnych zostały ponownie zweryfikowane, w oparciu o wzorzec NIST 1950:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CORMAY SERUM HN (Nr kat. 5-172) serii HN09, • CORMAY SERUM HP (Nr kat. 5-173) serii HP09, • CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 (Nr kat. 5-174 / 5-176) serii XXX-03X, XXX-04X • CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 (Nr kat. 5-175 / 5-177) serii XXX-03XX, XXX-04X, XXX-05, • CORMAY URINE CONTROL LEVEL 1 (Nr kat. 5-161) serii XXX-53, XXX-54, • CORMAY URINE CONTROL LEVEL 2 (Nr kat. 5-162) serii XXX-49, XXX-50. <p>Nowe wartości zamieszczono w erracie NDE_2206_01 (Załącznik 1).</p>		
Konieczne działania		
<p>Należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapoznać się z treścią erraty NDE_2206_01 (Załącznik 1) i od momentu otrzymania notatki doradczej stosować nowo wyznaczone wartości kalibratorów i kontroli podczas oznaczeń kwasu moczowego, • przeprowadzić kalibrację i kontrolę jakości przed zlecaniem próbek pacjentów, • odesłać wypełniony formularz weryfikacyjny. <p>Notatka ma charakter informacyjny. Nie należy niszczyć produktu!</p>		

Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim Użytkownikom powyższego produktu oraz zachowanie Notatki doradczej jako dokumentacji systemu jakości.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza weryfikacyjnego, w celu potwierdzenia otrzymania powyższych informacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 665 371 525

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane powyższą sytuacją.

Z poważaniem,

X

Anna Smolira

Dział Zapewnienia Jakości