

Zmiany w ofercie

Zestawy diagnostyczne do oznaczania stężenia bilirubiny bezpośredniej.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, **iz w maju 2022 r.**, PZ Cormay S.A. wprowadza do sprzedaży **zoptymalizowaną technologię odczynnika do oznaczania stężenia bilirubiny bezpośredniej**. Nowa formuła odczynnika zastępuje zestawy BIL DIRECT VANADATE (Tabela 1). Właściwości funkcjonalne odczynnika pozostają niezmienione.

Dodatkowe informacje:

- Nowa formuła odczynnika będzie oznaczona dodatkową etykietą „IV GENERACJA”.
- Dostępne zestawy BIL DIRECT IV GEN przedstawiono w Tabeli 1.
- Objętość reagentów nie uległa zmianie. Liczba testów możliwych do wykonania z zestawów również się nie zmieniła.
- **Aplikacje** na analizatory **ulegają zmianie** dla aparatów **Accent-200, Accent-300 oraz BS-800. Nowy odczynnik nie jest przeznaczony do oznaczeń manualnych.**
- Dla obecnie wprowadzanej formuły odczynnika **IV GENERACJI należy korzystać z nowo wyznaczonych wartości** dla surowic kontrolnych CORMAY SERUM HN i HP, oraz kalibratora CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 i 2 dołączonych do każdego zestawu.

Przed pierwszym użyciem nowego odczynnika należy wykonać następujące czynności:

1. Przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania, zwróć szczególną uwagę na charakterystykę działania i sprawdź aplikację na analizatorze.
2. Zaktualizuj aplikację, jeśli została zmieniona i przypisano jej nowe wartości dla kalibratorów i materiałów kontrolnych.
3. Wykonaj procedurę kalibracji i kontroli jakości.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami regionalnymi.

Adres do korespondencji: PZ Cormay S.A., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, Polska

Tabela 1. Lista zestawów BIL DIRECT VANADATE zastępowanych przez zestawy BIL DIRECT IV GENERACJI

Zestawy BIL DIRECT VANADATE		Lista zestawów BIL DIRECT IV GENERACJI	
Nr kat.	Nazwa zestawu	Nr kat.	Nazwa zestawu
B99-R0001	ACCENT-200 BIL DIRECT VANADATE	7-248	ACCENT-200 BIL DIRECT
B99-R0002	ACCENT-300 BIL DIRECT VANADATE	7-348	ACCENT-300 BIL DIRECT
B99-R0003	A-400 BIL DIRECT VANADATE	7-448	A-400 BIL DIRECT
B99-R0004	A-800 BIL DIRECT VANADATE	7-808	A-800 BIL DIRECT
B99-R0005	PRESTIGE 24i LQ BIL DIRECT VANADATE (24-tray)	4-248	PRESTIGE 24i LQ BIL DIRECT (24-tray)
B99-R0006	PRESTIGE 24i LQ BIL DIRECT VANADATE (36-tray)	4-448	PRESTIGE 24i LQ BIL DIRECT (36-tray)
		2-247	Liquick Cor-BIL DIRECT 30
B99-R0007	Liquick Cor-BIL DIRECT VANADATE 60	2-248	Liquick Cor-BIL DIRECT 60
		3-329	Liquick Cor-BIL DIRECT 120
		5-506	B50- BIL DIRECT
		4-548	HC-BIL DIRECT
		9-406	OS-BIL DIRECT

Z poważaniem,



Koordynator Zespołu Kontroli Zmian

NIO_2205_01

Adres do korespondencji: PZ Cormay S.A., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, Polska