

POWIADOMIENIE O ZMIANIE

Numer powiadomienia	PZ_2205_03	Data	25.05.2022
Numer zmiany	048		
Temat zmiany	Zmiana faktora RDW-SD w oprogramowaniu analizatorów Mythic.		
Produkt	Numer katalogowy	Nazwa	
	N/D	MYTHIC 18	
	N/D	MYTHIC 22	
	N/D	MYTHIC 22AL	
Kategoria zmiany	N/D	MYTHIC 60	
	<input type="checkbox"/> surowce	<input type="checkbox"/> kontrola jakości	
	<input type="checkbox"/> opakowania	<input type="checkbox"/> informacje dostarczane z wyrobem	
	<input type="checkbox"/> wytwarzanie	<input checked="" type="checkbox"/> wyrób gotowy	
		<input type="checkbox"/> inne	
Opis zmiany	Nowy współczynnik RDW-SD wprowadzony z nowymi wersjami oprogramowania analizatorów Mythic.		
Przyczyna zmiany	Zbyt niski zakres referencyjny dla parametru RDW-SD, powodujący nieprawidłowe flagowanie wyników.		
Wdrożenie zmiany	Maj 2022		
Informacje dodatkowe	<p>Oprogramowanie na analizatorach Mythic powinno zostać zaktualizowane do następujących wersji:</p> <p>MYTHIC 18 V3.3.8 MYTHIC 22 V3.2.3 & V2.6.3 MYTHIC 22AL V2.8.5 MYTHIC 60 V1.0.3</p> <p>Metryczki krwi kontrolnej i kalibratora będą zawierały wartości wyznaczone na nowym współczynniku RDW-SD. Ostatnie serie materiałów kontrolnych metrykowane w uwzględnieniu poprzedniego faktora to:</p> <p>MYT-5D Lot No MYT2204 MYT-3D Lot No B0522 MYT-CAL Lot No PLUS0522</p>		
Załączniki	N/D		

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tą zmianą prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży.

X *Anna Smolira*

Anna Smolira
Quality Assurance
Podpisany przez: Anna Smolira